

OKUZELL

one

Očné kvapky. Zdravotnícky prostriedok. Bez konzervačných látok. Hyaluronát sodný 0,2 %

Zložky

Hyaluronát sodný 0,2 %, chlorid sodný, hydrogénfosforečnan sodný, dihydrogénfosforečnan sodný a čistená voda.

Popis

Okuzell one je sterilný, viskoelastický, číry roztok bez konzervačných látok pre použitie na rohovku. Obsahuje iba látky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v oku. Okuzell one chráni, zvlhčuje povrch oka a lubrikuje ho. Poskytuje tak dlhodobú úľavu očíam, ktoré sú suché v dôsledku:

- keratoconjunctivitis sicca (Sjörgenov syndróm)
- poranenia rohovky, erózie, operácie rohovky
- používania kontaktných šošoviek
- hormonálnej poruchy, menopauzy
- klimatizácie, vetra, chladu, suchého tepla, prachu, dymu, znečisteného ovzdušia
- práce pri počítačovom monitore, dlhodobom riadení automobilu a diaľkových letov
- plávania v chlóranej vode

Skladovanie

Skladujte pri teplote 2 °C až 25 °C. Chráňte pred mrazom.


Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

- Nepoužívajte, ak je poškodený uzatvárací krúžok viečka alebo fľaštičky.
- Nedotýkajte sa fľaštičkou vášho oka.
- Kvôli riziku kontaminácie sa vyvarujte kontaktu aplikačným uzáverom fľaštičky s inými povrchmi alebo rukami.
- Nepoužívajte spolu s inými liekmi na oči.
- Neaplikujte na infikované oči.
- Po použití môže byť dočasne znížená zraková ostrosť. V takom prípade neriadte automobily ani neobsluhujte stroje a počkajte, kým sa neobnoví normálne videnie.
- Poznačte si na fľaštičku dátum jej prvého otvorenia.
- 180 dní po odstránení uzatváracieho krúžku viečka by mala byť fľaštička zlikvidovaná v komunálnom odpade.


Veľkosť balenia

10 ml


Návod na použitie

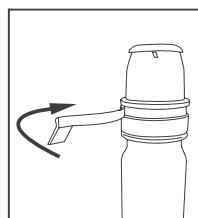


1. Pred prvým použitím odstráňte uzatvárací krúžok z viečka, potom môžete Okuzell one používať po dobu až 180 dní.

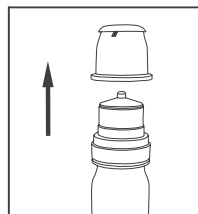

2. Odstráňte viečko.

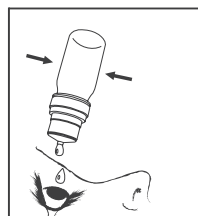

3. Stlačením fľaštičky vytlačte jednu kvapku priamo do oka alebo na kontaktnú šošovku.

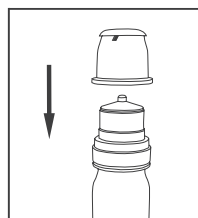

4. Po použití fľaštičku znova uzavrite viečkom.

Ďalšie informácie získate na adrese:

Pharmaselect SK s.r.o. / Sokolská 38
900 89 Častá / Slovenská republika
Email: info@pharmaselect.sk
www.pharmaselect.sk