

Zdravotnícka pomôcka

OKUZELL®**forte****očné kvapky****Sterilný zvlhčujúci roztok s hyaluronátom sodným 0,4 %, fľaštička 10 ml****Zloženie:** Hyaluronát sodný 0,4 %, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, voda.

Zdravotnícka pomôcka. Bez konzervačných látok.

Opis balenia a roztoku.

Očné kvapky OKUZELL forte sú sterilný očný roztok. Balenie obsahuje jednu 10 ml fľaštičku, čo je ekvivalent 250 kvapiek. Fľaštička je vybavená inovatívnym a patentovaným dávkovacím prvkom Ophthalmic Squeeze Dispenser (OSD) bez ochranného krytu. OSD zabraňuje preniknutiu škodlivých baktérií do roztoku, ktorý zostáva sterilný až 120 dní od prvého otvorenia.

Čo sú to očné kvapky OKUZELL forte?

Očné kvapky OKUZELL sú 0,4 % očný roztok s hyaluronátom sodným s vysokou molekulovou hmotnosťou získanou biotechnologickou syntézou. Hyaluronát sodný má mukomimetické, mukoadhezívne a viskoelastické vlastnosti, ktoré vylepšujú stabilitu slzného filmu a celkové pohodlie a udržiavajú povrch oka lubrikovaný, hydratovaný a chránený.

Kedy je vhodné použiť očné kvapky OKUZELL forte?

Zvlhčujúce a ochranné vlastnosti hyaluronátu sodného zmiernujú podráždenie, vysychanie, pálenie a pocit prítomnosti cudzieho predmetu v očiach, spôsobené environmentálnymi vplyvmi, ako je vietor, slnko, suchý vzduch, slaná voda, dym, nadmerné svetlo, klimatizácia, kúrenie, dlhodobé používanie počítača alebo v prípade chirurgického zásahu, zápalu spojiviek alebo častého a dlhodobého používania kontaktných šošoviek.

Ako používať očné kvapky OKUZELL forte?

1 kvapka do každého oka 2-3 krát denne, podľa potreby.

Vyvíňte mierny tlak na telo fľaštičky a kvapnite do oka jednu kvapku.

Varovania a upozornenia

Ak je nádoba poškodená, produkt nepoužívajte. Nepoužívajte súčasne s prípravkami, ktoré obsahujú kvartérne amóniové soli.

Nepoužívajte, ak ste precitlivený na ktorúkoľvek zo zložiek.

Nepoužívajte po dátume expirácie, ktorý je uvedený na fľaštičke a na vonkajšom obale.

Špičkou fľaštičky sa nedotýkajte oka.

Po podaní sa v zriedkavých prípadoch môže prejavíť dočasné mierne rozmazanie videnia z dôvodu viskozity roztoku. Je preto vhodné počkať niekoľko sekúnd pred zahájením akejkoľvek činnosti, ktorá vyžaduje ostré videnie.

Pred podaním ďalších očných liekov by malo uplynúť najmenej 10 až 15 minút.

Po 120 dňoch od prvého otvorenia fľaštičku zlikvidujte.

Po spotrebovaní zlikvidujte fľaštičku vhodným spôsobom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepožívajte.

Tento produkt je určený výhradne na očné použitie. Skladujte pri izbovej teplote.

Produkt je za normálnych okolností určený na súvislé používanie nie dlhšie ako 30 dní; ak symptómy pretrvávajú, navštívte lekára.

Produkt obsahuje fosfáty. U niektorých pacientov s výrazne poškodenou rohovkou boli počas používania očných kvapiek s obsahom fosfátov zaznamenané veľmi zriedkavé prípady kalcifikácie rohovky; z toho dôvodu neodporúčame používanie očných kvapiek u pacientov s vážnym poškodením povrchu rohovky (napríklad erózia alebo ulcerácia rohovky).

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Pharmaselect SK s.r.o., Galvaniho 15/A

821 04 Bratislava, Slovenská republika

Email: info@pharmaselect.sk

www.pharmaselect.sk



Výrobca: NTC SRL
 Via Luigi Razza, 3
 20124 Milan, Taliansko

Dátum revízie: 11/2024