

## OKUZELL

Návod na použitie

one

Očné kvapky. Zdravotnícky prostriedok. Bez konzervačných látok. Hyaluronát sodný 0,2 %

## Zložky

Hyaluronát sodný 0,2 %, chlorid sodný, dihydrogénfosforečnan sodný, dihydrogénfosforečnan sodný a čistená voda.

## Popis

Okuzell one je sterilný, viskoelastický, číry roztok bez konzervačných látok pre použitie na rohovku. Obsahuje iba látky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v oku. Okuzell one chráni, zvlhčuje povrch oka a lubrikuje ho. Poskytuje tak dlhodobú úľavu očiam, ktoré sú suché v dôsledku:

- keratoconjunctivitis sicca (Sjörgenov syndróm)
- poranenia rohovky, erózie, operácie rohovky
- používania kontaktných šošoviek
- hormonálnej poruchy, menopauzy
- klimatizácie, vetra, chladu, suchého tepla, prachu, dymu, znečisteného ovzdušia
- práce pri počítačovom monitore, dlhodobom riadení automobilu a diaľkových letov
- plávania v chlóranej vode

## Skladovanie

Skladujte pri teplote 2 °C až 25 °C. Chráňte pred mrazom.





## Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

- Nepoužívajte, ak je poškodený uzatvárací krúžok viečka alebo fľaštičky.
- Nedotýkajte sa fľaštičkou vášho oka.
- Kvôli riziku kontaminácie sa vyvarujte kontaktu aplikačným uzáverom fľaštičky s inými povrchmi alebo rukami.
- Nepoužívajte spolu s inými liekmi na oči.
- Neaplikujte na infikované oči.
- Po použití môže byť dočasne znížená zraková ostrosť. V takom prípade neriadte automobily ani neobsluhujte stroje a počkajte, kým sa neobnoví normálne videnie.
- Poznačte si na fľaštičku dátum jej prvého otvorenia.
- 180 dní po odstránení uzatváracieho krúžku viečka by mala byť fľaštička zlikvidovaná v komunálnom odpade.

## Veľkosť balenia

10 ml

## Návod na použitie

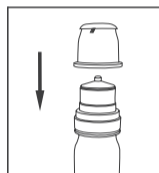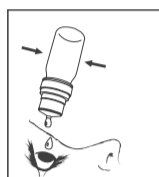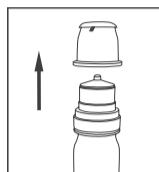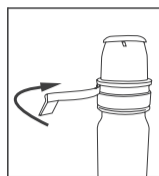

1. Pred prvým použitím odstráňte uzatvárací krúžok z viečka, potom môžete Okuzell one používať po dobu až 180 dní.

2. Odstráňte viečko.

3. Stlačením fľaštičky vytlačte jednu kvapku priamo do oka alebo na kontaktnú šošovku.

4. Po použití fľaštičku znova uzavrite viečkom.

Ďalšie informácie získate na adrese:  
Pharmaselect SK s.r.o., Galvaniho 15/A  
821 04 Bratislava, Slovenská republika  
Email: info@pharmaselect.sk  
www.pharmaselect.sk

Листовка

## Окуцелл

едно

Капки за очи без консерванти – Натриев хиалуронат 0,2%

## ОПИСАНИЕ:

Окуцелл едно капки за очи представляват: стерилни, вискоеластични, бистър защитен филм за роговицата без консерванти. Състоят се изцяло от естествени, биологически вещества. Окуцелл едно капки имитират ефекта на естествените сълзи. Те защитават, овлажняват и смазват очната повърхност. Това предоставя дълготрайно облекчение за очи, които са сухи поради:


- Сух кератоконюнктивит (синдром на Съогрен);
- Увреждания, ерозия, операции на роговицата;
- Носене на контактни лещи;
- Хормонални увреждания (менопауза);
- Климатизици, вятър, студ, суха топлина, прах, дим, замърсяване на въздуха;
- Работа пред компютърен екран, продължително пътуване с кола, полети на дълго разстояние;
- Плуване в хлорирана вода.

## СЪСТАВКИ:

Натриев хиалуронат 0,2%, натриев хлорид, натриев гидрогенфосфат, натриев дихрогенфосфат и пречистена вода

## СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява от 2°С до 25°С. Да се пазят от замръзване.

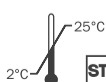

STERILE A



0483

Hersteller/Výrobce/Výrobca/ПРОИЗВОДИТЕЛ:

i.com medical GmbH, Kaferstr. 15, 81241 Munich, Mníchov, Mníchov  
Germany/Германия/Německo/Německo

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:





- Да не се използват, ако пластмасовото пръстенче на капачката е повредено.
- Не допирайте окоето с флакона.
- Поради риск от замърсяване, избягвайте контакта на върха на флакона с ръцете Ви или с други повърхности.
- Да не се използват заедно с други лекарства за очи.
- Да не се прилагат при очна инфекция.
- Непосредствено след употреба зрителната острота може да бъде временно намалена, в такъв случай не работете с машини и не шофирайте, докато не се възстанови нормалното зрение.
- Запишете датата на първоначалното отваряне на флакона на самия флакон.
- 6 месеца след като пластмасовото пръстенче на капачката е отстранено, флаконът трябва да бъде изхвърлен с битовите отпадъци.

## РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА:

10 ml

За допълнителна информация, моля, свържете се с:  
Pharmaselect Handels GmbH,  
Ernst-Melchior-Gasse 20,  
A-1020 Wien, Tel: 01-78603860,  
Email: info@pharmaselect.com  
www.pharmaselect.at

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

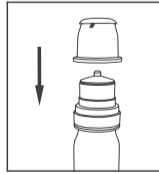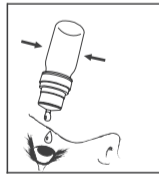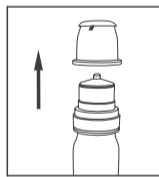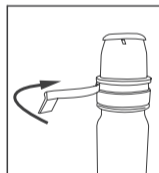

1. Откъснете пръстенчето на капачката преди първата употреба; Окуцелл едно може да се използва до 6 месеца.

2. Отстранете капачката.

3. Като приложите натиск странично върху флакона, капнете една капка директно върху окоето или контактните лещи.

4. След употреба върнете капачката на флакона на мястото ѝ; 6 месеца след първото отваряне, флаконът трябва да бъде изхвърлен заедно с битовите отпадъци.

## Официален Дистрибутор за България:

СТИНГ АД, София 1592,  
бул. "Асен Йорданов" № 6;  
ФАРМНЕТ АД, София 1832,  
район Кремиковци, ул.  
"Япаджа" № 6; ФЬОНИКС  
ФАРМА ЕООД София 1700,  
ул. „Околвърстен път“  
199А

Stand/Revize textu/Revízia textu/  
Дата на актуализиране: 09.2021